

Instructions de prélèvement

Matériel fourni

- 2 tubes de prélèvement ADN fœtal
- 1 tube de rejet
- 2 étiquettes d'identification
- 1 sac biohazard
- 1 papier blanc absorbant
- 1 sac Purolator avec une pochette déjà en place
- Papier bulle ou enveloppe thermique bulle
- 1 requête de transport Purolator
- 1 requête Genolab et instruction de prélèvement
- 1 boîte de transport

Matériel non fourni

- Aiguille 21G
- Gants

Instructions des documents à remplir

Requête Genolab


Remplir tous les champs de la requête.

Consentement

Faire lire le consentement Genolab

Instructions de prélèvement

- A. Utiliser une aiguille de calibre 21 G (aucun papillon)
- B. Prendre les tubes d'ADN fœtal (bouchon marbré) et remplir de sang au complet (7-10 ml).
- C. Inverser les tubes délicatement 8-10 fois.

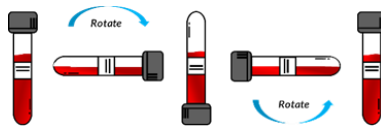

- D. Identifier les tubes avec les étiquettes dûment remplies :
 - Nom et prénom de la patiente,
 - Date de naissance (AAAA/MM/JJ)
 - Son numéro de RAMQ ou identifiant médical, si applicable.
- E. **Ne pas congeler, ni réfrigérer.**

Entreposage de l'échantillon

Entreposage de l'échantillon à une température ambiante (18 – 30 C ou 65 – 86 F).

Ne pas réfrigérer, ni congeler.

Acceptation/Rejet de l'échantillon

Les échantillons doivent être envoyés au laboratoire dans les 24hrs suivant le prélèvement.

La cliente doit avoir un minimum de 10 semaines de gestation et plus lors du test.

L'échantillon doit être correctement identifié.

L'échantillon doit être prélevé avec des tubes non expirés.

Informations supplémentaires

Téléphoner au : 1-888-440-3723 poste 2502

Écrire au : info@genolab.ca

Télécopie : 418-681-9793

Numéro d'urgence : 418-998-9785

Pour un ramassage Purolator :

www.purolator.com ou 1-888-744-7123

Transfert des informations à Genolab

Envoyer par courriel à : info@genolab.ca ou par télécopie au 418-681-9793 les documents suivants :

- Requête dûment remplie

Instruction d'expédition

- A. Insérer les tubes de prélèvement identifiés dans le sac biohazard avec le papier absorbant et refermer.
- B. Insérer la réquisition remplie dans l'ouverture derrière le sac.
- C. Enrouler le sac biohazard dans le papier bulle ou une enveloppe thermique bulle.
- D. Insérer le sac dans la boîte de transport et fermer la boîte.
- E. Mettre la boîte dans le sac de transport Purolator et refermer.
- F. Imprimer le bordereau d'expédition Purolator et l'insérer dans la pochette
- G. Faire une demande de ramassage Purolator par téléphone ou internet pour le jour même.